




BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN



Niet gebruiken als het dier **fotosensibiliserende geneesmiddelen** neemt of aan een aandoening lijdt die **lichtgevoeligheid** kan veroorzaken.

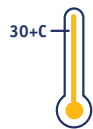

Het ledvenster kan **warm** worden tijdens gebruik – niet gebruiken in aanwezigheid van ontvlambare gassen; houd de lens van de werkende lamp niet tegen de huid (van uzelf of van het dier). Als de lamp wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van meer dan 30°C, las dan een pauze van 60 seconden in voordat u een tweede cyclus start. Indien de temperatuur de ingestelde gevarenlimiet bereikt, zullen de thermische sensoren het toestel automatisch uitschakelen.



Houd de lamp, zoals alle elektronische apparatuur, in een goede conditie door uitsluitend geautoriseerde **onderdelen en accessoires** te gebruiken, en door de lamp op minstens 30cm afstand te houden van sterke **radiobronnen** of gevoelige **elektronische apparatuur**.



Indien de lamp van een koude naar een warme, vochtige ruimte wordt verplaatst, kan dit schade berokkenen door interne **condensatie**. Zorg dat de lamp op kamertemperatuur is voordat u de lamp aanzet.



Aanpassingen of reparaties aan de lamp zijn niet toegestaan – contacteer uw Vetoquinol-vertegenwoordiger in geval van mogelijke **storing** of indien **reparatie** vereist is.

Geluidssignalen weerklinken:

- Bij het begin en einde van een belichtingscyclus
- Bij een lege batterij
- Bij oververhitting
- Bij het starten en stoppen van een oplaadcyclus



De lamp wordt geleverd met **oplaadbare batterijen**.

De batterijstatus wordt weergegeven door een **indicatielampje**:

- Continu groen = Volledig opgeladen, capaciteit voor 25 cycli
- Knipperend groen = Minder dan 50%, capaciteit voor minder dan 12 cycli
- Knipperend geel = Opladen vereist, capaciteit voor minder dan 4 cycli

Een constant geel indicatielampje tijdens het opladen, betekent dat er voldoende capaciteit is voor minimaal 1 cyclus.

5 witte lichtstreepjes vormen de **timer/batterijniveau-indicator**.

Tijdens het opladen geeft elk wit streepje 20% van de batterijcapaciteit aan.

Tijdens het belichten staat elk wit streepje voor 24 seconden.



Uitgebreide gebruiksaanwijzingen:



Phovia®
LED lamp



Phovia®
Gel



PHOVIA

De kracht van licht



GEBRUIKSAANWIJZING

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER



2 MINUTEN PER SESSIE
2 SESSIES NA ELKAAR
OF 2 SESSIES PER WEEK
WEKELIJKS TE HERHALEN




1 controleer

De lamp

De lamp is voldoende opgeladen, het indicatorlicht kleurt groen of geel.

De gel

De dragergel is doorschijnend, de chromoforengel is fel oranje van kleur. Houd de ampullen met chromoforengel in de folie tot gebruik!

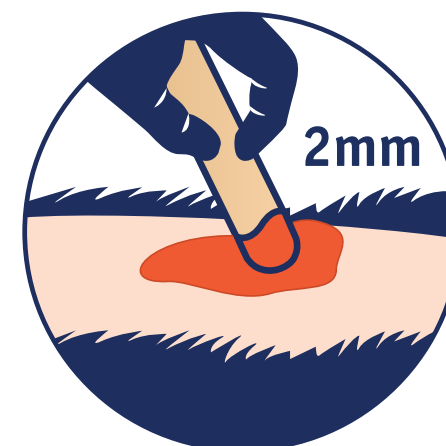

4 smeer

Breng met de spatel een laagje gel van ongeveer **2mm** dik aan. Bedek het volledige gebied.




2 mix

Draag handschoenen.

Roer met de spatel de oranje chromoforengel door de dragergel.

Dek de gel af tot gebruik.

Opgelet! Eenmaal gemixt, moet de gel zo snel mogelijk gebruikt worden.

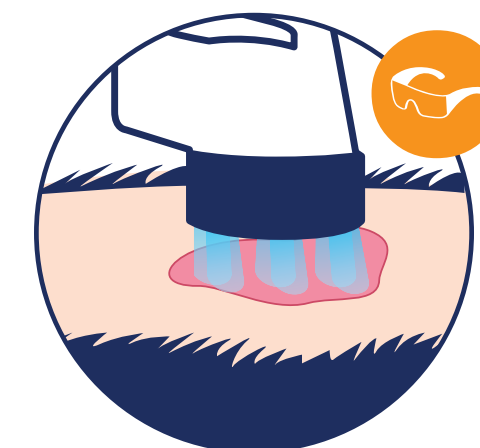

5 start

Alle aanwezigen dragen een **veiligheidsbril**, het dier kijkt weg van het licht.

Houd de lamp zo dicht mogelijk tegen de huid, zonder de gel aan te raken.

Druk op de **START/STOP** knop – een geluidssignaal geeft de start van de belichting aan.

2 minuten worden afgeteld – elk wit streepje op de timer/batterijniveau-indicator staat voor 24 seconden. Een geluidssignaal geeft het einde aan, het ledlicht **schakelt automatisch uit**.



3 reinig

Scheer en reinig de huid.

Verwijder laatste vuilresten met een gaasje gedrenkt in steriele zoutoplossing.



6 reinig

Verwijder de gel met een gaasje gedrenkt in steriele zoutoplossing.