

L'utilisation de la lumière fluorescente dans la pratique



Indications et durée du traitement

Vous trouverez ci-dessous la durée moyenne du traitement lorsque la lumière fluorescente est ajoutée au traitement standard.

La durée du traitement et le nombre de traitements doivent être adaptés en fonction de la gravité et de la chronicité de l'affection cutanée. La lumière fluorescente peut être utilisée seule ou avec des médicaments, tels que: shampoings topiques, antibiotiques (par voie topique, orale, injectables), des médicaments anti-inflammatoires, immunosuppresseurs, immunomodulateurs (par ex.: Oclacitinib, stéroïdes, cyclosporine, Tacrolimus, Lokivetmab), des pansements (pansements au miel),...

La prise en charge adéquate de l'affection primaire sous-jacente est essentielle à la réussite du traitement.

Fréquence du traitement: 1 fois par semaine (2 traitements consécutifs)

Pyodermie superficielle

Durée du traitement 2 à 3 semaines

Si elle est généralisée, vous pouvez choisir de traiter les zones les plus sévères.



Foto: Dr Marchegiani

Pyodermie profonde

Durée du traitement 4 à 6 semaines

Si elle est généralisée, vous pouvez choisir de traiter les zones les plus sévères.



Foto: Dr Pin

Pododermatite bactérienne et furonculose

Durée du traitement 4 à 6 semaines

Si les lésions sont situées à la fois dorsalement et palmairement/plantairement, il est recommandé d'exposer les deux côtés séparément.



Foto: Dr Fantini

La dermatite pyotraumatique (hotspot)

Durée du traitement 1 à 2 semaines

Si les blessures sont près du visage, n'oubliez pas de couvrir les yeux de l'animal.



Foto: Dr Cochet-Faivre

Fréquence du traitement: 1 fois par semaine (2 traitements consécutifs)

**Dermatite de léchage /
Granulome de léchage**

Durée du traitement 4 à 6 semaines



Callus pyoderma

Durée du traitement 4 à 6 semaines



**Furonculose anale et Fistules
périanales**

Durée du traitement 4 à 8 semaines



Intertrigo

Durée du traitement 2 à 4 semaines

Si les blessures sont près du visage, n'oubliez pas de couvrir les yeux de l'animal.



**Plaie traumatique
(aiguë et chronique)**

Durée du traitement 4 à 6 semaines

Un nettoyage et un débridement appropriés de la plaie sont essentiels.
La zone à traiter peut contenir une large marge de tissu sain.
Le traitement par lumière fluorescente peut être effectué
immédiatement après le débridement.



Incision chirurgicale

Durée du traitement 1 à 2 semaines

La zone à traiter peut contenir une large marge de tissu sain.
Le traitement par lumière fluorescente peut être effectué immédiatement
après la chirurgie.



Les images et recommandations ci-dessus sont basées sur des études de cas réalisées par des spécialistes.
Chaque traitement fait l'objet d'une analyse risques-avantages. Vetoquinol n'est pas responsable des divergences sur ces protocoles.